


Kompressor forstøver

- ① Stempel kompressor
- ② Stremmedning
- ③ PÅ/VÅ Knapp
- ④ Rom for luftfilter
- ⑤ Forstøver
 - : Forstørreheide
- ⑥ Luftslange
- ⑦ Munstykke
- ⑧ Voksenmaske
- ⑨ Barnemaske
- ⑩ Bytte ut luftfilter
- ⑪ Monter forstøver utstyr
- ⑫ Nesedel
- ⑬ Luftfilter

Kjære kunde,
Denne forstøveren er et aerosolt behandlingsystem som er egnet for hjemmebruk. Denne enheten brukes til forstøring av vasker og flytende medisin (aerosoler) og for behandling av øvre og nedre luftveier.
Dersom du har noen spørsmål, problemer eller behov for reserverdeler, bøs, den vennligst ta kontakt med dres lokale Microflite-kundeservice. Forhandleren eller apoteket kan gi deg adressen til representanten for Microflite der du bor. Gå inn på www.microflite.com der det finnes en lang rekke tilfeldige opplysninger om varer apparat.
Ta vare på helsen - Microflite AG!

1. Betydning av symboler

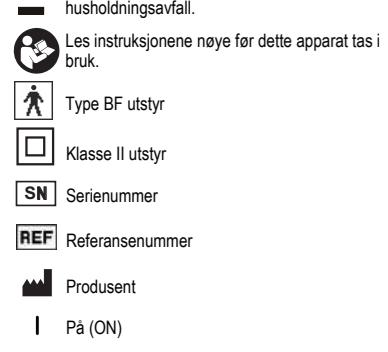

IP21 Beskyttet mot faste fremmedlegemer og skadlige effekter på grunn av vanninntrenging

CE 0123 CE samsvarserklæring

2. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Farlig instruksjoner for bruk. Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om driften av denne enheten samt sikkerhetsinformasjon. Les dette dokumentet nøye før du bruker enheten, og lagre den for senere bruk.
- Dette apparatet må bare brukes til det formål som er beskrevet i dette heftet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk.
- Oppbevar instruksjonsthetta på en sikker plass for senere bruk.
- Ikke bruk enheten når noen brennbar blanding av anestesiemedler med oksygen eller nitrogenoxid.
- Apparatet er ikke egnet for anestesi og ungentevetting.
- Apparatet må kun brukes med original tilleggsutstyr slik det er vist i instruksjonene.
- Apparatet må ikke brukes dersom du har mistanke om at det er skadet eller dersom det er tegn på noe uvanlig.
- Apparatet må aldri åpnes.
- Dette apparatet inneholder falsoms komponenter og må behandles varsomt. Vær obs på de forbud vedrørende lagring og betjening som er nevnt i avsnitt «Tekniske spesifikasjoner»!
- Beskytt det mot:
 - vann og fukt
 - ekstreme temperaturer
 - støg og vibrasjoner
 - forurensning og støv
 - direkte sollys
 - varme og kulde

6. Funksjonseffekt og tiltak

- Apparatet kan ikke slås på**
- Sørg for at ledningen ② er koriktig plassert i støpselen.
 - Forsikre om at PÅ/VÅ knappen ③ er posisjonert riktig.
 - Sørg for at enheten har vært i drift minst én drifts periode før den er enig i denne instruksjonen (30. på 30 min. Av).

Inhalatoren virker dårlig eller ikke i det hele tatt

- Sørg for at luftslangen ④ er koriktig festet i begge ender.
- Sørg for at luftslangen ikke er klemt eller bøydd, uren eller blokkert. Hvis nødvendig, skiftes med ny.
- Sørg for at forstørrelsen skiftes til etter en periode på mellom 6 måneder og 1 år, avhengig av bruk.

Bruk bare originale forstøtere!

7. Garanti

- Dette apparatet er dekket av en 5 års garanti regnet fra kjøpsdatoen. Garantien er bare gyldig når det foretaktes et garantikort som følger med enheten (se bakside) med bekræftelse av kjøpsdatoen, eller en kittering.

• Garantien dekker bare kompressoren, Reservedeler som forstøver, maskin, munstykke, luftslange, og filter ikke er inkludert.

• Enheter som er endret i henhold til teknisk standard er ikke dekket.

• Kontakt enheten til forstørrelsen ved hjelp av teknisk servicecenter.

• Enheter som ikke er dekket kan ikke produsentens holdes ansvarlig for.

• Ikke bytt ut strømledningen til denne enheten. Ved skade på strømledningen må man kontakte teknisk servicecenter med autorisasjon fra produsenten for utskifting.

• Strømledningen skal alltid hentes ut for å forhindre farlig overvarming.

• Bruk ikke annen form for vedlikehold eller rengjøring må enheten slås av og kontakten kobles fra vegguttaget.

• Bruk kun medisiner forstøret av din lege og følg legens instruksjoner med hensyn til dosering, varighet og hvor ofte behandlingen skal gjøres.

• Avhengig av patolog, bruk kun behandling som er anbefalt av legen.

• Bruk ikke medisinen hvis den ikke er godkjent av EMA.

• Bruk ikke apparatet i nærheten av sterke elektromagnetiske felt som for eksempel mobiltelefoner eller radiostasjoner. Hold en minimumsavstand på 3,3 meter fra elektroniske apparater når du bruker dette apparatet.

• Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten tilsyn sammen med for eksempel for kvelning hvis apparatet leveres med kabler eller slanger.

• Bruken av dette apparatet er ikke ment som ertstating for konsultasjon med lege.

• Innstilling og bruk av apparatet

Før forstørrelsen skal artiklene vedslag som fortalt i denne delen: «Rengjøring og desinfeksjon». Forsikre deg om at alle deler er skreddersydd.

• Fyll forstørrelsen med luftslangen ④ med kompressor ① og ledningen ② settens i stikkontakten (230V 50 Hz AC).

• Sett på PÅ/VÅ knappen ③ til innstilling «1» for å starte apparatet.

• Munstykket gir bedre forsyning av legemiddel til lungene.

NO

Kompresora inhalators

LV

- Velg mellom voksen ⑥ eller barnemaske ⑨ og forstørre om alt mannt og neser er dekket helt.
- Bruk et luftbånd, inkludert nesedel ⑫ slik som beskrevet av lege.
- 5. Under inhalasjon må man sitte opprett og avslappet ved et bord og ikke i lenge, dette for å unngå luftveiene komprimeres og påvirker behandlingen effektiviteten. Ligg ikke under inhalasjonen. Stopp inhalasjonen ved uebagt.
- 6. Etter ferdig inhalasjonsoppdraget bør legen, så PÅ/VÅ knappen ③ til posisjonen «0» for å slå av apparatet og få luftveiene tilbake til normalt.
- 7. Tom avstørene av medisinen forstørrelsen og vask utstyr som fortell i delen «Rengjøring og desinfeksjon».
- 8. Dette apparatet er laget for intermitterende bruk på 30 min. PÅ/30 min. Av. Slå av apparatet etter 30 min. bruk og vent 30 min. før nestebehandling.
- 9. Apparatet krever ingen kalibrering.
- 10. Ingen endringer på apparatet er tillatt.

4. Rengjøring og desinfeksjon

Vask grundig etter hver behandling alle delene for å fjerne medisinsmetaler og mulige funnsmessinger. Bruk en myk og tørr klut med rengjøringssmidel som ikke slipper for å øngre kompressoren.

• Kontroller at enheten av enheten ikke er i kontakt med vasker og alt støpseter er frakoblet.

Rengjøring og desinfeksjon av tilbehør

Følg instruksjonene for rengjøring og desinfeksjon av tilbehøret nedenfor og vask utstyr med vannet og vasket veltet.

• Vask masken og luftbåndet med vannet og vasket veltet.

• Bruk en kald desinfiserende vaskesøpe og følg instruksjonene fra produsenten.

• Ikke koke eller autoklavér luftet rettet og masker.

5. Vedlikehold, beskyttelse og service

Bestill alle reservedeler fra forhandleren eller apoteket, eller ta kontakt med Microflite-Service (se forord).

Utskifting av forstøveren

• Støt forstørrelsen ⑤ etter en lang periode uten aktivitet, hvis den viser tegn til deformering, beskadigelse, eller når forstørrelsen ikke ③-hindrer utstøting medisin, støv etc.

• Vi anbefaler at forstørrelsen skiftes ut etter en periode på mellom 6 måneder og 1 år, avhengig av bruk.

• Bruk bare originale forstøtere!

6. Utskifting av luftfilter

Apparatet kan ikke slås på

- Sørg for at ledingen ② er koriktig plassert i støpselen.
- Forsikre om at PÅ/VÅ knappen ③ er posisjonert riktig.
- Sørg for at luftslangen ikke er klemt i drift innenfor drifts perioden som er angitt i denne instruksjonen (30. på 30 min. Av).

• Bruk ikke luftfilter som ikke er originalt tilleggsutstyr.

• Apparatet er ikke egnet for anestesi og ungentevetting.

• Apparatet må kun brukes med originalt tilleggsutstyr slik det er vist i instruksjonene.

• Apparatet må ikke brukes dersom du har mistanke om at det er skadet eller dersom det er tegn på noe uvanlig.

• Apparatet må aldri åpnes.

• Dette apparatet inneholder falsoms komponenter og må behandles varsomt. Vær obs på de forbud vedrørende lagring og betjening som er nevnt i avsnitt «Tekniske spesifikasjoner»!

• Beskytt det mot:

- vann og fukt
- ekstreme temperaturer
- støg og vibrasjoner
- forurensning og støv
- direkte sollys
- varme og kulde

7. Garanti

Dette apparatet er dekket av en 5 års garanti regnet fra kjøpsdatoen. Garantien er bare gyldig når det foretaktes et garantikort som følger med enheten (se bakside) med bekræftelse av kjøpsdatoen, eller en kittering.

• Garantien dekker bare kompressoren, Reservedeler som forstøver, maskin, munstykke, luftslange, og filter ikke er inkludert.

• Enheter som er endret i henhold til teknisk standard er ikke dekket.

• Kontakt enheten til forstørrelsen ved hjelp av teknisk servicecenter.

• Enheter som ikke er dekket kan ikke produsentens holdes ansvarlig for.

8. Tekniske spesifikasjoner

Forstøver verdi: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)

Partikkelstørrelse: 63% < 5 µm

Maks. fri luftfylt: 15 liter

Driftsutfstrom: 5,31 litermin.

Akustisk lydnyd: 52 dB

Strømkilde: 230V 50 Hz AC

Lengde strømledning: 1,6 m

Inhalasjonskapasitet: 5 m³; max. 8 ml

Gjennoms. volum: 0,8 ml

Driftsregningsmerke: 30 min. PÅ / 30 min. Av

Arbeidsforhold: 10 °C - 50 °C / 10 °F - 95 °F

30 - 85 % relativ maksimalt fuktighet

700 - 1060 hPa atmosfærisk trykk

-25 + 70 °C / -13 + 158 °F

10 - 95 % relativ maksimalt fuktighet

Luftfuktighet: 30 min. On (lesløft) / 30 min. Off (lesløft)

Smidzningshastighet: 5 m/s

Luftfuktighet: 5 m/s

Luftfukt